

Clé USB de l' UFT



lancer la lecture au son

Se placer dans l'environnement Morselu

< [Voir ici pour rappel](#) >

Sélectionner la fonction "lecteur" sur le bandeau supérieur
un sous menu apparaît avec les commandes :

click droit = notice expliquant la possibilité d'interrompre la lecture par un click droit

options = accès à la fenêtre des options

lecture = lancement de la lecture proprement dite

Interruption de la lecture

Pendant la lecture, pour des raisons de bon fonctionnement le curseur n'a pas été laissé à la disposition de l'utilisateur. Néanmoins ce dernier a la possibilité d'arrêter la lecture à tout moment (le dernier caractère étant achevé) en appuyant sur le click droit.

Un nouveau sous menu apparaît avec les commandes :

options = accès à la fenêtre des options (*)

suite = reprend la lecture au caractère qui suit celui de l'arrêt (**)

reprise = reprend la lecture au début du texte (**)

fin = arrête la lecture (**) (***)

Remarques :

(*) l'appui sur la touche 'OK' fait réapparaître le même sous menu

(**) la sélection d'une de ces trois commandes active l'option retenue

(***) la sortie de la fonction "lecteur" demande un certain temps. Elle est effective lorsque l'inversion vidéo 'caractère' en bleu disparaît.

Pour sortir de "morselu"

utiliser la commande Fichier

puis la commande Quitter

Bonne continuation.....

< [Retour](#) >